



Vision meets Precision

Ansur nader bekeken

AdQuipment medical




Vision meets Precision

Ansur nader bekeken

- Ansur versie 3.0
 - Wat is er nieuw
 - Installeren
- Foto's invoegen
- Patiëntdelen instellen
- Service handelingen

AdQuipment medical

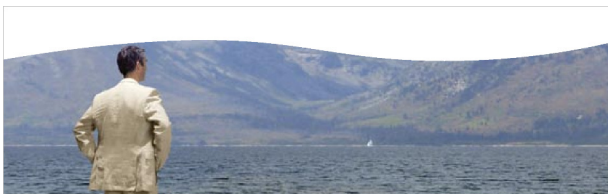

Vision meets Precision

Ansur V3.0


AdQuipment medical

Nieuw in Ansur V3.0

- Aanmelden
 - Drie autorisatie niveaux
 - Electronische handtekening
- Toestel gegevens aanpasbaar
- Vereenvoudigde update van meetapparatuur


AdQuipment medical

Opbouw Ansur V3.0

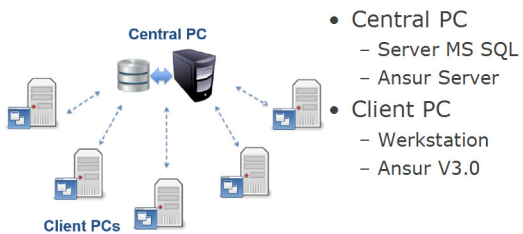

AdQuipment medical

Autorisatie niveaux

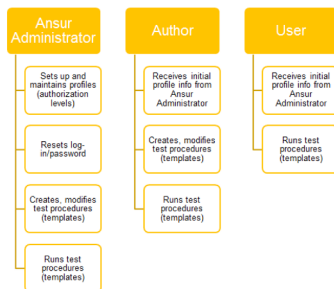


AdQuipment medical


Installatie Ansur V3.0

- Installeer en configureer MicroSoft SQL Server
 - Versie 2005 of 2008
 - Op server in netwerk
 - Open firewall voor SQL Server
- Niet nodig voor werken zonder aanmelden

Installatie Ansur Server

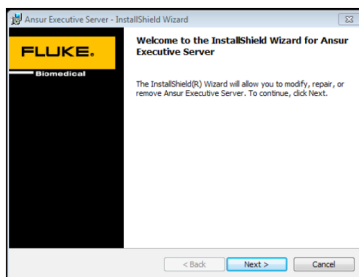


Instellen Ansur Server

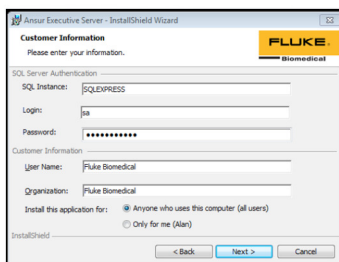


- Gegevens
 - Vanuit SQL installatie

Installatie Ansur Client

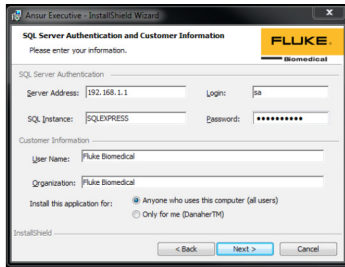


- Gegevens
 - Vanuit server installatie

Installatie Ansur Client

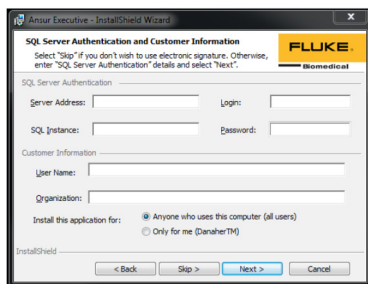

- Gegevens
 - Leeg laten
- Skip kiezen

Starten Ansur V3.0

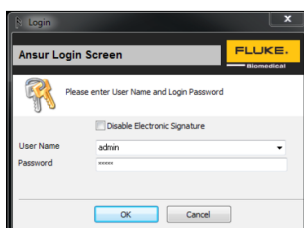

- Naam en wachtwoord
 - Door administrator aangemaakt
- Bij Disable niet nodig
 - Geen handtekening



Vision meets Precision

Foto's invoegen

AdQuipment *medical*

Vision meets Precision

Foto's invoegen


Op drie manieren mogelijk:

- Als Link
- Binnen HTML tekst
- Binnen RTF tekst

AdQuipment *medical*

Vision meets Precision


Foto's als Link

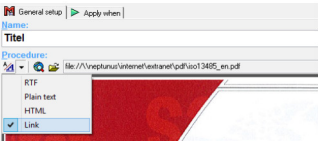

- Kies voor type Link
- Selecteer het bestand
 - Bestand moet tijdens uitvoeren bereikbaar zijn !

AdQuipment *medical*


Foto's in HTML

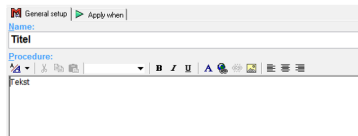

- Kies voor type HTML
- Klik op icoon en selecteer het bestand
 - Bestand moet tijdens uitvoeren bereikbaar zijn !

AdQuipment medical

Foto's in RTF

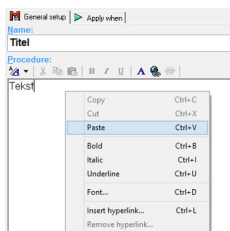

- Kies voor type RTF
- Kopieer afbeelding vanuit bijv. WORD
- Plak in Ansur Editor
 - Pas resolutie tevoren aan !

AdQuipment medical

Foto's in Ansur

- Link en HTML
 - Externe verwijzing
 - Bestanden altijd meenemen
 - Bestanden op gelijke plaats
- RTF
 - Afbeelding in template bestand
 - Resolutie laag houden
 - Totale omvang template plm. 100MB

AdQuipment medical



Vision meets Precision

Patiëntdelen instellen

AdQuipment medical

Vision meets Precision

Patiëntdelen instellen


Vanaf Ansur V2.9:

- Op meerdere plaatsen te definiëren
 - Bij maken test sequence
 - Tijdens uitvoeren protocol
 - Bij schrijven protocol

AdQuipment medical

Vision meets Precision


Originele wijze (sequence)

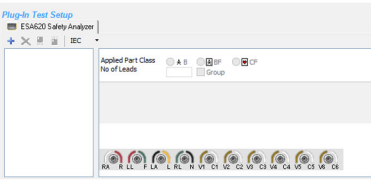

- Kies File → New → Sequence
- Kies Edit → Add Template
 - Alleen als template ESA tests bevat

AdQuipment medical


On the fly (test guide)

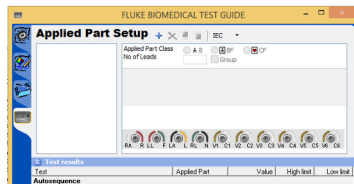

- Tijdens uitvoeren protocol
- Klik op vierde tabblad
 - Alleen als template ESA tests bevat

AdQuipment medical

In protocol (template)

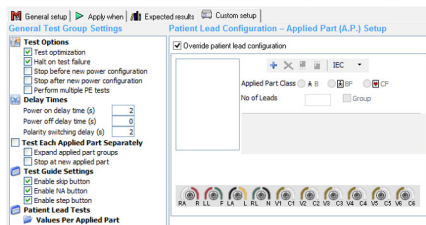

- Bij het schrijven van het protocol
 - Onder Custom Setup van AutoSequence

AdQuipment medical

Waar patiëntdelen ?

- In het protocol
 - Vraagt protocol per type of model
 - Geeft stabiliteit
 - Filtering mogelijk
- On the fly
 - Voor algemeen veiligheidstest protocol
 - Kan variëren per technicus

AdQuipment medical



Vision meets Precision

Service handelingen

AdQuipment medical

Vision meets Precision


Service handelingen

- Om deel van protocol uit te voeren
- Opgebouwd uit
 - Activiteit (Groep)
 - Handeling (Sub)
- Kan via Job Order aangegeven worden
 - Wel óf niet aanpasbaar

AdQuipment medical

Vision meets Precision


Handelingen invoeren

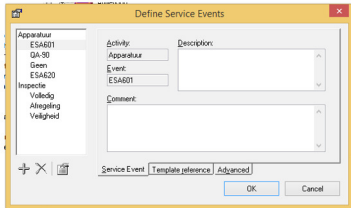

- Activiteit automatisch bij elkaar
 - Exact gelijk invoeren

AdQuipment medical

Handelingen koppelen

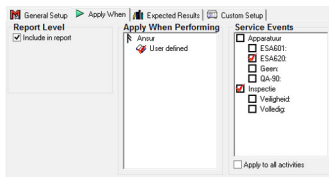

- Binnen container alleen geselecteerde handelingen
- Géén selectie betekent altijd


AdQuipment medical

Selectie en/of

- Uitvoeren als één aangegeven handeling is geselecteerd
 - Houdt een of-combinatie in
- Uitvoeren als één handeling uit specifiek niveau geselecteerd
 - Door verschillende niveaus en-combinatie

AdQuipment medical

Handelingen niveau

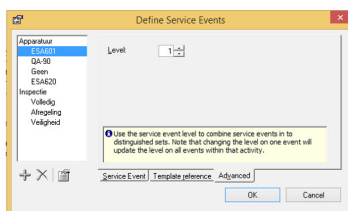

- Niveau per activiteit
 - Alle handelingen gelijk niveau

AdQuipment medical



Vision meets Precision

Vragen en suggesties

AdQuipment medical



Vision meets Precision

AdQuipment medical
