



*Vision meets Precision*

## Haal meer uit Ansur

---

---

---

---

---

---

---

---



*Vision meets Precision*

## Inhoud

- Huidige versie
- Bestanden organiseren
- Starten vanuit Verkenner
- Document eigenschappen
- Robuuste Templates
- Conditional Test Container

---

---

---

---

---

---

---

---



*Vision meets Precision*

## Huidige versie

---

---

---

---

---


---

---

---

## Nieuw in versie 2.9.7

- Conversie MTR → PDF vanuit Verkenner
- Opslag in PDF na Testguide

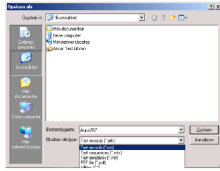

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## Bestanden organiseren

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Keuze bestandsbeheer

- Windows
  - Geen extra kosten
  - Zelf versies beheren
  - Lees en schrijfrechten controleren
- Document Beheer Systeem
  - Vorige versies blijven behouden
  - Toegangsrechten instellen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Rechten op Ansur bestanden

- Templates
  - Beperkt aantal mensen schrijfrecht
  - Iedereen leesrecht
- Resultaten
  - Folder voor iedereen schrijfrecht
  - Keuze voor modificatie rechten

---

---

---

---

---

---

---

---



## Starten vanuit Verkenner

---

---

---

---

---

---

---

---

## Starten vanuit Verkenner

- Standaard instelling
  - Template/Sequence: Uitvoeren
    - Alleen Testguide
  - Resultaten: Bekijken
    - Met gehele interface
- Zelf aan te passen of toe te voegen
  - Ook meerdere keuze mogelijkheden

---

---

---

---


---

---

---

---

# Starten vanuit Verkenner

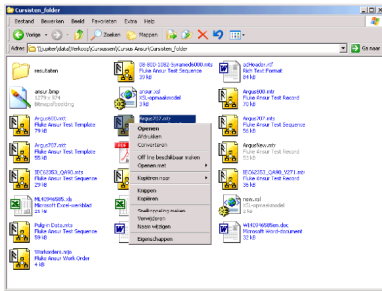

---

---

---

---

---


---

---

---

# Aanpassen acties

- Via Mapopties van de Verkenner

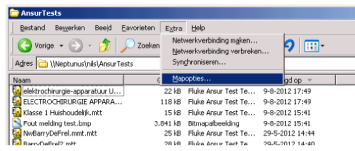

---

---

---

---


---

---

---

---

# Aanpassen/toevoegen acties

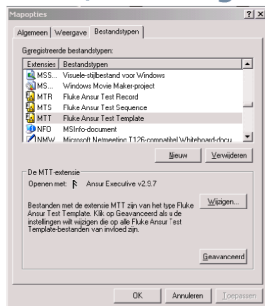

---

---

---

---


---

---

---

---

## Aanpassen/toevoegen acties

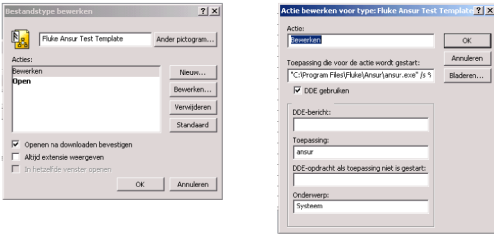

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Schakelopties

- Basis programma  
"C:/Program Files/Fluke/Ansur/ansur.exe"
- Te gebruiken opties
  - /s Bekijken
  - /r Uitvoeren
  - /p Afdrukken
  - /f Converteren naar PDF (vanaf v2.9.7)
  - /h Alleen Testguide (niet icm bekijken)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## Document eigenschappen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Document eigenschappen

- Extra informatie in het bestand
  - Beschrijving protocol
  - Auteur
  - Versie nummer
  - Redenen aanpassing
- Belangrijk voor kwaliteitsbeheer

---

---

---

---


---

---

---

---

## Activeren eigenschappen

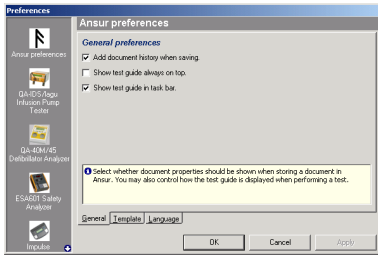

---

---

---

---


---

---

---

---

## Invoeren eigenschappen

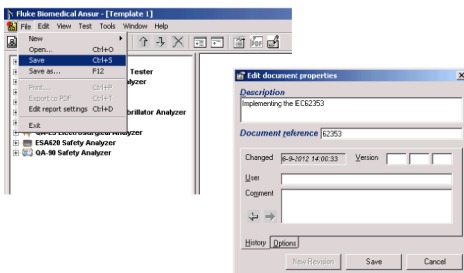

---

---

---

---

---

---

---

---



*Vision meets Precision*

## Robuuste Templates

---

---

---

---

---

---

---

---



## Robuuste Templates

- Altijd toe te passen, ongeacht
  - Uitvoering DUT
  - Niveau onderhoud
  - Beschikbaar meettoestel
- Eenvoudiger te onderhouden
  - Één wijziging voor alles versies

---

---

---

---

---

---


---

---



## Robuuste Templates

- Keuze dmv Service Events
  - Levels voor apparatuur en niveau

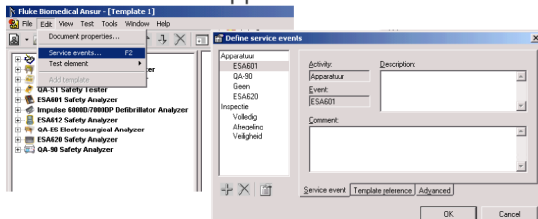

---

---

---

---


---

---

---

---

## Service Event toepassen

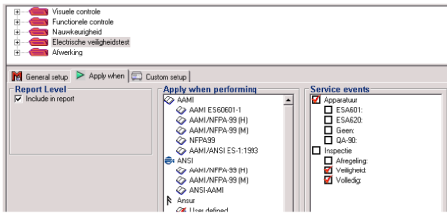

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

## Niveau/apparatuur kiezen

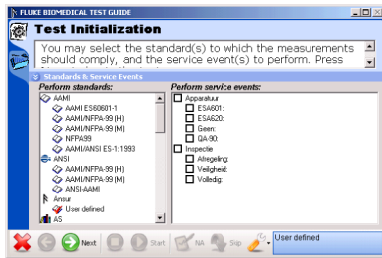

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

## Opvang automatische test

- Overslaan automatische test toegestaan
  - Dan volgt de handmatige meting

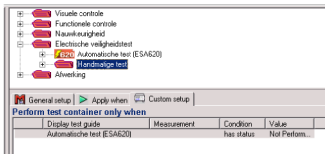

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





*Vision meets Precision*

## Conditional Test Container

---

---

---

---

---

---

---

---



*Vision meets Precision*

## Conditional test container

- Kan status aanpassen
  - Algeheel resultaat goedgekeurd ondanks een afkeur
  - Op basis van vastgestelde voorwaarden
- Goedkeuren dmv alternatieve test
  - Bijv. aanraakstroom na aanraakspanning

---

---

---

---

---

---


---

---



*Vision meets Precision*

## Gebruik conditional TC

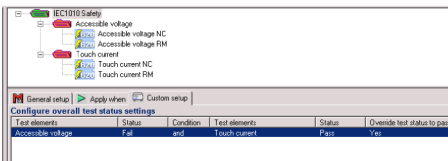

- Apparaat goedgekeurd als
  - Spanning te hoog
  - En stroom binnen grenzen

---

---

---

---

---

---

---

---



*Vision meets Precision*

Succes

---

---

---

---

---

---

---

---